

 Operating Room

電動式低圧吸引器

メラサキューム 009

型式 MS-009T

MERA Continuous Suction Unit



メラサキュームの継承

胸腔・腹腔ドレナージに幅広く使いやすくなりました。




3色から選べるカラーバリエーション

ピンク・グリーン・ブルーから用途に合わせた選択が可能。




トレンド 胸腔ドレナージのエアリーク経過管理に便利なトレンド機能 **NEW**

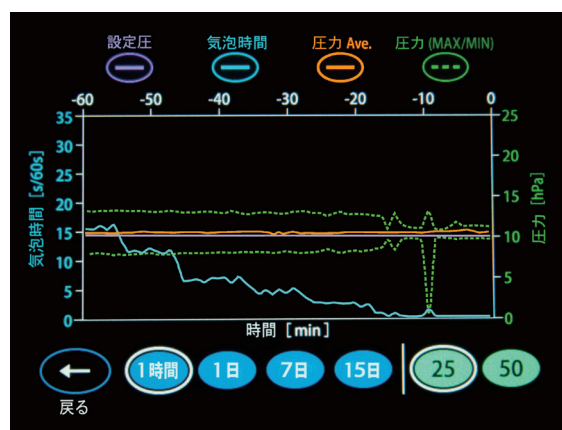

- 圧力センサで検知した気泡時間、平均圧力、最大・最小圧力をトレンド表示します。
- 気泡時間は、水封に気泡が通過したときの急激な圧力変動を検知し（吸引回路内圧）、60秒間当たり発生した気泡時間の合計時間を表示します。
- 各パラメータのデータから安静時、咳、深呼吸などエアリークの経過観察に役立ちます。


(特許第5985996号)

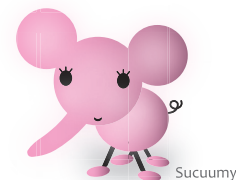

ユーザビリティ 綺麗くっきり！カラー液晶タッチパネル **NEW**

誤操作防止のユーザーフレンドリー設計

- 新しく自動ロック機能を採用し、医療スタッフの目の届きにくい病棟、移動時の不意な誤操作を未然に防止します。
- 操作に困らないポップアップガイダンス機能を搭載。
- 間欠時間の設定は、アップダウンで秒から分に連続式に切り替える方式になり、また前回呼出機能を追加しました。
- 機能制限モードで使いたい機能だけ画面表示をカスタマイズして、すっきりディスプレイ。（自動ロック・間欠吸引・トレンド・アラーム音停止・中断）

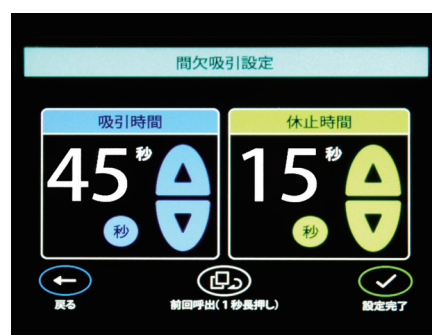

汚染感染対策 2種類の脱着交換式の吸引回路セットを1台で共有可能

EXフィルターセット


- PTFEフィルター（疎水性）を搭載した吸引回路

- 洗浄、消毒が不要な単回使用タイプ。


洗浄ドレンタンクセット **NEW**

- 丸洗い、浸漬洗浄、消毒で繰り返し使用できる吸引回路。

- 吸引ポンプへの排液流入による故障を防止するため、単回使用のオーバーフロー防止フィルターを新たにラインナップしました。

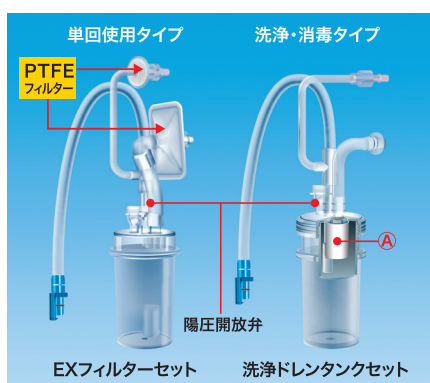

Ⓐ オーバーフロー防止フィルター（単回使用）

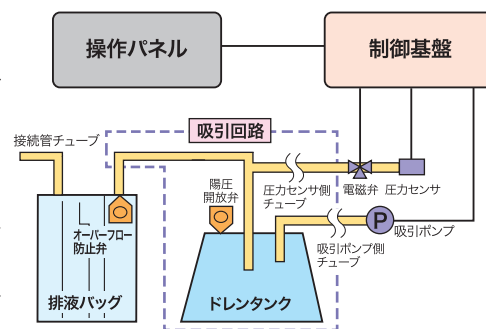

バッテリー機能 新バッテリーとリフレッシュ機能で保守性アップ

約4時間の急速充電 **NEW**

- 60分以上のバッテリー運転が可能。
- 3段階のバッテリー残量表示。
- 保守はバッテリーユニットを交換するだけ。

自動バッテリーリフレッシュ機能を新しく搭載 **NEW**

- リフレッシュ2モード（2回の連続リフレッシュシステム）ならリフレッシュ前後の改善状態を確認できます。



■オプション

吸引回路



■EXフィルターセット



■洗浄・消毒タイプ(未滅菌)

オーバーフロー
防止フィルター(単回使用)

接続管チューブ



■メラコネクタ付接続管



■メラコネクタ付接続管

排液バッグ



■メラアクアシールD2バッグ
(容量1000mL)



■メラアクアシール2000バッグ
(容量2000mL・患者側2ポート)



■メラアクアシール
逆流防止弁



■シールキャップ



■排液キャップ
(未滅菌)



■メラDバッグ

MSカート



■メラMSカート G



■メラMSカート ST



■メラMSカート DX

※ガートル台は含まれません。

仕様	
設定吸引圧・最大流量	-1~-50 hPa・cmH ₂ O・mbar(選択式) 2.0L/分以上
間欠吸引の時間設定(吸引、休止)	1秒~59秒→1分~60分
定格電源・バッテリー	AC100V 50/60Hz DC12V ニッケル水素蓄電池 連続運転時間:60分以上 充電時間:約4時間
電源入力	60VA以下
外形寸法	250mm(W)×200mm(D)×480mm(H)
重量	4.3kg
電撃に対する保護の形式による分類(JIS T0601-1:2014)	商用電源接続時 クラスⅠ機器 および内部電源機器
EMC適合	EMC規格 JIS T0601-1-2:2012
防滴規格	IPX0
表示・警報作動	リーク警報・高陰圧警報・バッテリー残量警報・システムエラー・メモリエラー・圧力センサエラー・バッテリーエラー・バッテリー未接続エラー
バックアップメモリ	トレンド画面データ15日間・履歴画面データ300件分
USB	USB2.0

コード番号	JANコード(14)	販売名	規格/型式	包装(数量)	許認可番号
0150001400	04544753038669	メラサキーム009	MS-009Tグリーン	1セット/箱	228ADBZX00080000
0150001500	04544753038676		MS-009Tピンク		
0150001600	04544753038683		MS-009Tブルー		
0150501401	14806019614510		EXフィルターセット	10個/箱	
0150501600	04806019614537		洗浄ドレンタンクセット	1個/箱	
0150501501	14806019614527		オーバーフロー防止フィルター	10個/箱	
0150100101	14806019600490	メラアクアシール	D2バッグ	20個/箱	11B1X00016000001
0150100201	14806019600506		2000バッグ	12個/箱	
0158001501	14544753018330		逆流防止弁	10個/箱	
0150204501	14806019604856	メラコネクタ付接続管	US×P×1.5m	10本/箱	11B1X00016000002
0150204701	14806019604870		UL×P×1.5m		
0150100301	14806019600513	メラDバッグ	1000	20個/箱	11B1X00016000004
0150200601	14806019600575	メラコネクタ付接続管	8×10×1.5m	10本/箱	11B1X00016000002
0150503101	14806019607048	メラアクアコンフォート	シールキャップ	10個/箱	11B1X00016000226
0150502401	14806019605846	排液キャップ	排液キャップ(大) 白ポート・患者側	50個/箱	医療機器非該当品
0150502501	14806019605853		排液キャップ(小) 青ポート・器械側		
0150500400	04544753167734	メラMSカート G	ガートル台取付タイプ	1式/箱	医療機器非該当品
0150500300	04544753167727	メラMSカート ST	ガートル棒付		
0150500200	04544753167710	メラMSカート DX	ガートル棒付(両サイド取付可能)		

製造販売業者



■埼玉県春日部市浜川戸2-11-1 ■問い合わせ先:本社商品企画:TEL.03-3812-3254 FAX.03-3815-7011

■営業拠点:札幌支店・東北支店・青森・盛岡・福島・関東支店・つくば・松本・新潟・東京支店・横浜・中部支店・静岡・金沢・関西支店・中四国支店・岡山・四国・九州支店・鹿児島

【注意】 実際のお取り扱いの際には取扱説明書及び添付文書をよくお読みになってからご使用下さい。

■常に研究・改良に努めておりますので、仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
●2018/3/3000 ●クラス分類:Ⅱ ●不許複製 ●GR-3 ●B-76 ●BO-0327-01 www.mera.co.jp/